

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα φαρμακεία



Μαζί μπορούμε καλύτερα...

Είδη Μασκών	ΜΑΣΚΑ ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) ΤΥΠΟΙ: FFP1, FFP2, FFP3 	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (Υγειονομικό υλικό) ΤΥΠΟΙ: I, II, IIR 	ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (μάσκα κοινότητας, κάλυμμα προσώπου, υφασμάτινη μάσκα, χειροποίητη μάσκα) 	ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΑΣΚΑ ΜΑΠ+ΙΑΤΡΙΚΗ) 
Προβλεπόμενη χρήση	Προστασία του ατόμου που τη φοράει από εισπνοή επικίνδυνων σωματιδίων	Αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων που προέρχονται από το άτομο που τη φοράει. Η μάσκα τύπου IIR είναι ανθεκτική στα υγρά και μπορεί να προστατεύσει από μολυσμένα σταγονίδια που μεταφέρονται με αντίσταση μεγαλύτερη των 16,0kPa	Δεν έχουν κατασκευαστεί για προστασία από κινδύνους. Δεν συστήνεται η χρήση τους για προστασία από την έκθεση σε μολυσματικούς παράγοντες	Ίδια χρήση με τις χειρουργικές/ιατρικές μάσκες & τις μάσκες με φίλτρο
Πιστοποίηση	Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας	Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα	Δεν υπάρχει	Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/425 για τα μέσα ατομικής προστασίας και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Κανονισμός	EN 149:2001 + A1	EN 14683:2019 + AC: 2019	Δεν υπάρχει	EN 14683:2019 + AC:2019 EN 149:2001 + A1
Περιορισμοί χρήσης	Δεν θεωρείται ιατρικό προϊόν (υγειονομικού χαρακτήρα)	Δεν θεωρείται μέσο ατομικής προστασίας	Δεν θεωρείται ιατρικό προϊόν ούτε μέσο ατομικής προστασίας	Θεωρείται ιατρικό προϊόν & μέσο ατομικής προστασίας
Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης	Σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να υποδηλώνει ότι είναι μάσκα μιας χρήσης με σήμανση NR ή επαναχρησιμοποιούμενη με σήμανση R	Μη επαναχρησιμοποιούμενη	Επαναχρησιμοποιούμενη / Μη επαναχρησιμοποιούμενη	Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Δυνατότητα καθαρισμού ή/και απολύμανσης	Μόνο οι μάσκες με σήμανση (R) μπορούν να καθαριστούν και να απολυμανθούν στο σημείο επαφής με το πρόσωπο και όχι στο φίλτρο.	Όχι.	Ακολουθείστε τις οδηγίες πλυσίματος του κατασκευαστή. Συνιστάται η μάσκα να στεγνώνει φυσικά για τουλάχιστον 2 ώρες μετά το πλύσιμο. Το στέγνωμα και η αποθήκευση της μάσκας θα πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον όπου η μάσκα δεν μπορεί να μολυνθεί ξανά. Δεν συνιστάται το στέγνωμα σε φούρνο μικροκυμάτων.	Δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού ή/και απολύμανσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα φαρμακεία



Μαζί μπορούμε καλύτερα...

Είδη Μασκών	ΜΑΣΚΑ ΜΑΠ (Μέσα Ατομικής Προστασίας) ΤΥΠΟΙ: FFP1, FFP2, FFP3	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (Υγειονομικό υλικό) ΤΥΠΟΙ: I, II, IIR	ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (μάσκα κοινότητας, κάλυμμα προσώπου, υφασμάτινη μάσκα, χειροποίητη μάσκα)	ΜΑΣΚΑ ΔΙΠΛΗ (ΜΑΣΚΑ ΜΑΠ+ΙΑΤΡΙΚΗ)
Τύπος προστασίας	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ: Προστατεύουν από την εισπνοή σωματιδίων. Μπορούν να διπλωθούν ή να προσαρμοστούν. Μπορούν ή όχι να έχουν βαλβίδες εκπνοής	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ: Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα άμεσης μετάδοσης μολυσματικών σωματιδίων μεταξύ του ατόμου που νοσεί και των ατόμων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο	Μη ελεγμένη αποτελεσματικότητα	Προστασία και από έξω προς τα μέσα και αντίστροφα
Προτεινόμενος πληθυσμός	1. FFP1: Λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας σε φιλτράρισμα, δεν συστήνεται η χρήση τους για προστασία από τον κορονοϊό	1. Συστήνεται η χρήση από ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή με συμπτώματα λοίμωξης	Για χρήση από ενήλικες ή/και παιδιά χωρίς συμπτώματα που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν χειρουργική μάσκα ή/και μάσκα ΜΑΠ, ή για χρήση από τον πληθυσμό σε περίπτωση έλλειψης των άλλων ειδών μασκών	Για χρήση από το υγειονομικό προσωπικό που φροντίζει ασθενείς με επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή από άτομα που εισέρχονται στον χώρο του ασθενούς
	2. FFP2: συστήνεται η χρήση τους από το υγειονομικό προσωπικό ή από άτομα που φροντίζουν/έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή που εισέρχονται στους χώρους απομόνωσης των ασθενών	2. Συστήνεται η χρήση από το υγειονομικό προσωπικό ή από άτομα που συνοδεύουν ασθενείς σε χώρους απομόνωσης		
	3. FFP3: συστήνεται η χρήση τους από το υγειονομικό προσωπικό που εμπλέκεται σε ιατρικές εργασίες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές που παράγουν αερολύματα			



Ο Π.Ο.Υ. τονίζει ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της μόλυνσης: διατηρείτε αποστάσεις, συχνό πλύσιμο χεριών, να βήχετε ή φτερνίζετε στο αγκώνα και αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπο



Το πλύσιμο και το στέγνωμα επαναχρησιμοποιημένων масκών πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και των υγειονομικών αρχών. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προϊόντος



Η βαλβίδα εκπνοής ορισμένων αυτοφιλτραρισμένων масκών διευκολύνει την αναπνοή του χρήστη και αποτρέπει την υγρασία. Δεν είναι κατάλληλες για ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις διότι δεν φιλτράρουν τον εκπνεόμενο αέρα και μπορούν να αποτελέσουν πηγή μετάδοσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τον ασθενή



Μαζί μπορούμε καλύτερα...

Τύποι Μασκών	Επαναχρησιμοποιούμενη;	Με προστατεύει;	Προστατεύει τους άλλους;	Προτεινόμενη χρήση
FFP1 (Μάσκα με φίλτρο)	Σύμφωνα με την οδηγία αν φέρει σήμανση NR δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενη, αν φέρει σήμανση R είναι επαναχρησιμοποιούμενη	✗	✗	Λόγω της χαμηλής αποτελεσματικότητας σε φιλτράρισμα, δεν συνιστάται η χρήση τους για προστασία από τον κορονοϊό
FFP2 (Μάσκα με φίλτρο)		✓	✗	Χρήση από το υγειονομικό προσωπικό που φροντίζει ασθενείς με COVID-19 ή από άτομα εισέρχονται στο δωμάτιο απομόνωσης του ασθενούς
FFP3 (Μάσκα με φίλτρο)		✓	✗	Χρήση από το υγειονομικό προσωπικό που εμπλέκεται σε ιατρικές εργασίες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές που παράγουν αερολύματα
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ	Όχι	✗	✓	Χρήση από ασθενείς με COVID-19 ή συμπτώματα λοίμωξης
				Χρήση από το υγειονομικό προσωπικό ή άτομα που συνοδεύουν τους ασθενείς στους χώρους απομόνωσης
ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣΚΑ (μάσκα κοινότητας, κάλυμμα προσώπου, υφασμάτινη μάσκα, χειροποίητη μάσκα)	Πλένετε και απολυμαίνετε τη μάσκα με απλό απορρυπαντικό και νερό σε θερμοκρασία μεταξύ 60°C – 90°C (κανονικός κύκλος πλύσης)	Δεν υπάρχει	Δεν υπάρχει	Χρήση από ενήλικες ή / και παιδιά χωρίς συμπτώματα για λόγους προστασίας, που δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση χειρουργικής μάσκας ή μάσκας με φίλτρο, ή για χρήση από τον πληθυσμό σε περίπτωση έλλειψης των άλλων ειδών масκών
	Βυθίστε τη μάσκα σε διάλυμα 1:50 χλωρίνης -νερού (1 μέρος χλωρίνη - 50 μέρη κλιαρό νερό) για 30'. Μετά πλύνετε τη μάσκα με σαπούνι και νερό. Ξεπλύνετε καλά για να μην μείνουν υπολείμματα χλωρίνης και αφήστε να στεγνώσει πλήρως			



Ο Π.Ο.Υ. τονίζει ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της μόλυνσης: διατηρείτε αποστάσεις, συχνό πλύσιμο χεριών, να βήχετε ή φτερνίζετε στο αγκώνα και αποφύγετε να αγγίζετε το πρόσωπο



Το πλύσιμο και το στέγνωμα επαναχρησιμοποιούμενων масκών πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή ή/και των υγειονομικών αρχών. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του προϊόντος



Η βαλβίδα εκπονής ορισμένων αυτοφιλτραρισμένων масκών διευκολύνει την αναπνοή του χρήστη και αποτρέπει την υγραποίηση. Δεν είναι κατάλληλες για ασθενείς με αναπνευστικές λοιμώξεις διότι δεν φιλτράρουν τον εκπνεόμενο αέρα και μπορούν να αποτελέσουν πηγή μετάδοσης